



Guida all'installazione

MOBOTIX c ONE NurseAssist realizzato con la tecnologia Kepler Vision Technologies

© 2026 MOBOTIX AG



Indice dei contenuti

Indice dei contenuti	2
Prima di iniziare	5
Supporto	6
MOBOTIX Supporto	6
MOBOTIX eCampus	6
MOBOTIX Comunità	6
Note legali	6
Misure di protezione	8
Note sul cablaggio	8
Protezione antincendio	8
Protezione da fulmini e sovratensioni	8
Modello di foratura	9
Drilling Template PDF	10
c ONE: Ambito di fornitura	12
Materiali di consumo per il montaggio: Volume di fornitura	13
Panoramica	15
Lato sensore	16
Retro	16
Specifiche tecniche	17
Informazioni sull'ordine	18
Hardware	18
Proprietà di immagini e video	20
App Kepler NurseAssist - Specifiche tecniche	20
Caratteristiche generali del software	23
Ulteriore analisi video	24
Sistemi di chiamata infermieri / Software di gestione video	24
Dimensioni	25
Montaggio	27
Prima di montare la telecamera	28
Rimozione della piastra posteriore	28
Montaggio della piastra posteriore	29
Collegamento della telecamera	30
Collegamento di un dispositivo USB-C	30
Collegamento dei dispositivi di I/O	31
Assegnazione dei pin dei connettori I/O	31
Collegamento della telecamera alla rete	32
Opzioni di montaggio	33
Installazione a filo soffitto	33
Rimozione della telecamera dal soffitto	34
Installazione a filo soffitto	34
Preparazione della telecamera	35
Preparazione del Set di montaggio a parete	35
Installazione di Set di montaggio a parete	36
Rimozione della telecamera	38
Regolazione dell'obiettivo della telecamera	39
Regolazione e messa a fuoco dell'obiettivo della telecamera	39
Utilizzo della telecamera	41
Come iniziare	42
Stati dei LED	42

Impostazioni di rete	42
Impostazione iniziale della telecamera	42
Controllare le precondizioni	42
Accesso alla telecamera	43
Trovare l'indirizzo IP "reale" della telecamera	46
Impostare automaticamente con MxManagementCenter	46
Impostazioni di rete sulla telecamera in MxMC	47
Impostazioni di rete della telecamera nel browser Web	48
Software della telecamera nel browser	49
Accesso alla telecamera nel browser web	50
Impostazioni di base	50
Manutenzione	53
Sostituzione della scheda microSD	54
Pulizia della telecamera	54
Istruzioni per la pulizia e la disinfezione	55
Requisiti generali	55
Procedura di pulizia	55
Requisiti successivi alla pulizia	56
Detergenti e disinfettanti approvati	56
Detergenti incompatibili	56

Prima di iniziare

Supporto	6
Note legali	6
Misure di protezione	8

Supporto

MOBOTIX Supporto

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il vostro rivenditore MOBOTIX. Se il rivenditore non è in grado di aiutarvi, contatterà il canale di assistenza per ottenere una risposta il più rapidamente possibile.

Se si dispone di un accesso a Internet, è possibile aprire l'help desk di MOBOTIX per trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti del software.

Visitare il sito www.mobotix.com > Servizi > Help Desk.



MOBOTIX eCampus

L'eCampus di MOBOTIX è una piattaforma di e-learning completa. Vi permette di decidere quando e dove visualizzare ed elaborare i contenuti dei vostri seminari di formazione. È sufficiente aprire il sito nel browser e selezionare il seminario di formazione desiderato.

Visitare il sito www.mobotix.com/ecampus-mobotix.



MOBOTIX Comunità

La comunità di MOBOTIX è un'altra preziosa fonte di informazioni. Il personale di MOBOTIX e gli altri utenti condividono le loro informazioni, e anche voi potete farlo.

Visitare il sito community.mobotix.com.



Note legali

Questo documento e i suoi contenuti sono di proprietà di MOBOTIX AG e sono protetti dalle leggi sul copyright. È severamente vietata la riproduzione, la distribuzione, la modifica o l'uso di questo documento, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto di MOBOTIX AG.

Tutti i nomi dei prodotti, i marchi, i loghi e le marche citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questi possono includere, ma non solo, marchi di fabbrica e marchi di certificazione di organizzazioni terze. L'uso di tali

marchi è solo a scopo identificativo e informativo e non implica alcuna affiliazione o approvazione da parte dei rispettivi proprietari dei marchi. MOBOTIX AG riconosce i diritti di tutti i detentori di marchi e non rivendica marchi di proprietà di terzi.

Aspetti legali della registrazione video e sonora

Quando si utilizzano i prodotti MOBOTIX AG, è necessario rispettare tutte le normative sulla protezione dei dati per il monitoraggio video e audio. A seconda delle leggi nazionali e del luogo di installazione delle telecamere, la registrazione di dati video e audio può essere soggetta a documentazione speciale o può essere vietata. Tutti gli utenti dei prodotti MOBOTIX sono pertanto tenuti a conoscere tutte le normative vigenti e a rispettarle. MOBOTIX AG non è responsabile per l'uso illegale dei suoi prodotti.

Dichiarazione di conformità

I prodotti di MOBOTIX AG sono certificati secondo le normative vigenti della CE e di altri Paesi. Le dichiarazioni di conformità per i prodotti di MOBOTIX AG sono disponibili su www.mobotix.com alla voce **Servizi > Centro di download > Marketing e documentazione > Certificati e dichiarazioni di conformità**.

Dichiarazione RoHS

I prodotti di MOBOTIX AG sono pienamente conformi alla Direttiva RoHS 2011/65/UE (Restrictions of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) dell'Unione Europea, nella misura in cui sono soggetti a tali normative (per la dichiarazione RoHS di MOBOTIX, consultare www.mobotix.com, **Services > Download Center > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Certificates**).

Smaltimento

I prodotti elettrici ed elettronici contengono molti materiali preziosi. Per questo motivo, si consiglia di smaltire i prodotti MOBOTIX alla fine del loro ciclo di vita in conformità con tutti i requisiti e le normative legali (o di depositare questi prodotti presso un centro di raccolta comunale). MOBOTIX prodotti non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici! Se il prodotto contiene una batteria, smaltirla separatamente (se il prodotto contiene una batteria, i manuali del prodotto contengono indicazioni specifiche).

Esclusione di responsabilità

MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata osservanza dei manuali o delle norme e dei regolamenti applicabili. Si applicano i nostri Termini e condizioni generali. È possibile scaricare la versione aggiornata delle **Condizioni Generali** dal nostro sito web www.mobotix.com facendo clic sul link corrispondente in fondo a ogni pagina.

Esclusione di responsabilità FCC

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe A, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente dovrà correggere l'interferenza a proprie spese.

Misure di protezione

AVVERTENZA!

Per la posa dei cavi all'interno e all'esterno, è necessario rispettare sempre le norme vigenti in materia di posa dei cavi, di protezione contro i fulmini e gli incendi.

MOBOTIX Le telecamere e i dispositivi sono protetti dagli effetti di piccole sovratensioni grazie a una serie di misure. Tuttavia, queste misure non possono impedire che sovratensioni di maggiore entità causino danni alla telecamera. Quando si installano le telecamere all'aperto, occorre quindi prestare particolare attenzione alla protezione contro i fulmini e ai pericoli associati per l'edificio e l'infrastruttura di rete.

In generale, le telecamere e i dispositivi MOBOTIX dovrebbero essere installati solo da aziende specializzate certificate che conoscono l'installazione e il funzionamento sicuro dei dispositivi di rete e le relative norme per la protezione contro i fulmini e gli incendi, nonché la tecnologia attuale per prevenire i danni da sovratensioni.

Note sul cablaggio

- **Cavo dati:** Come cavo dati per l'interfaccia Ethernet si può usare solo un cavo CAT5 a doppia schermatura o migliore (S/STP).
- **Lunghezza del cavo:** Per garantire una perfetta trasmissione dei dati, le singole sezioni del cavo non devono superare la lunghezza massima consentita.
- **Evitare l'induzione:** I cavi dati possono essere posati parallelamente a linee elettriche o ad alta tensione solo se vengono rispettate le distanze minime prescritte.

Protezione antincendio

Quando si posano i cavi per l'alimentazione, è necessario rispettare le norme specifiche del paese (ad es. VDE in Germania) e le norme antincendio in vigore nel luogo di installazione.

Protezione da fulmini e sovratensioni

È necessario adottare sempre le misure necessarie per proteggere il dispositivo dai danni causati dalle sovratensioni elettriche.


Ulteriori informazioni su come evitare i danni causati da fulmini e sovratensioni sono disponibili presso i produttori di dispositivi di protezione da fulmini e sovratensioni.

Modello di foratura

Aprire il file in un visualizzatore PDF (Adobe Reader o simile) e stampare il file **senza ridimensionarlo (dimensione originale)**.

NOTA!

Sagoma di foratura: www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Marketing e documentazione > Modelli di perforazione.

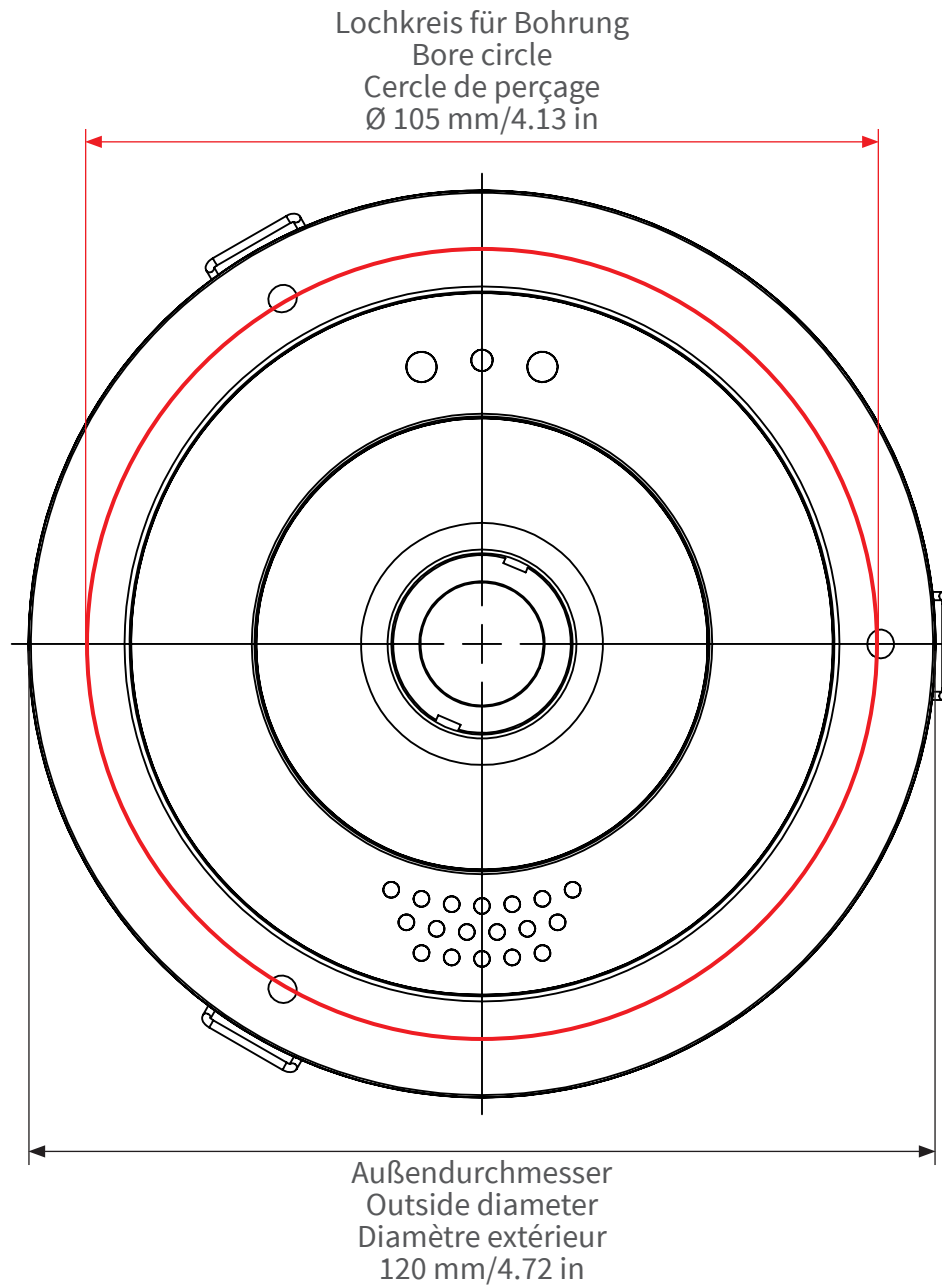

Nur in Originalgröße
kopieren oder ausdrucken!
Always copy or print at 100%
of original size!
Copier ou imprimer
uniquement aux dimensions
d'origine !

2

c ONE: Ambito di fornitura 12

Materiali di consumo per il montaggio: Volume di fornitura13


c ONE: Ambito di fornitura



Contenuto della fornitura c ONE: Corpo

Articolo	Quantità	Descrizione
1.1	1	c ONE
1.2	1	MOBOTIX Cavo patch Ethernet, 50 cm/19,7 pollici (installato)
1.3	1	Scheda SD 64 GB (installata)
1.4	1	Morsettiera I/O rimovibile
1.5	1	Materiali di montaggio (vedere la Contenuto della confezione c ONE: Accessori di montaggio, p. 13)
1.6	1	Informazioni sulla sicurezza
1.7	1	Adesivo con l'indirizzo IP della telecamera

Materiali di consumo per il montaggio: Volume di fornitura

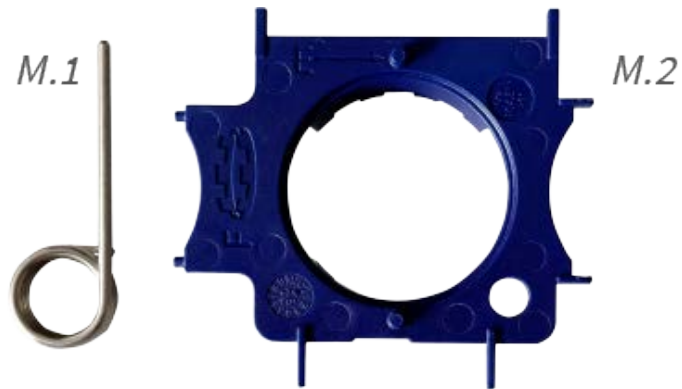


Contenuto della confezione c ONE: Accessori di montaggio

Articolo	Quantità	Descrizione
M.1	1	Attrezzo per lo smontaggio
M.2	1	Chiave modulare MultiTool


Panoramica

Lato sensore	16
Retro	16

Lato sensore

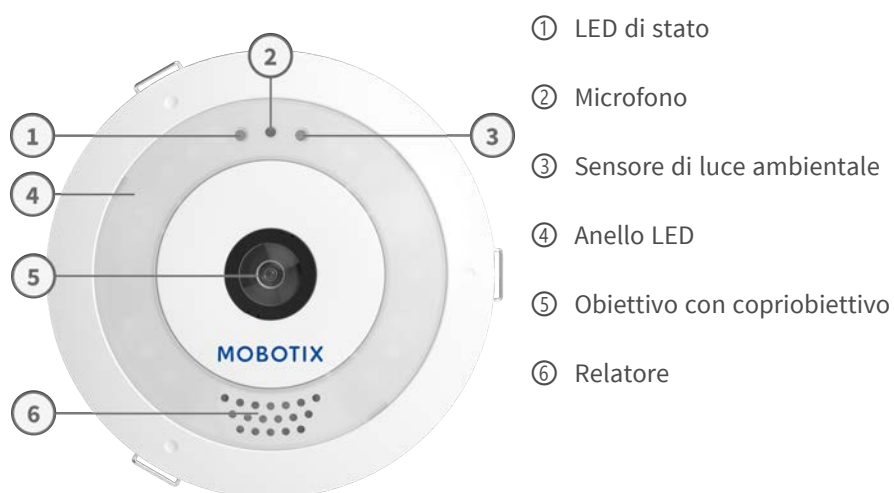

Retro

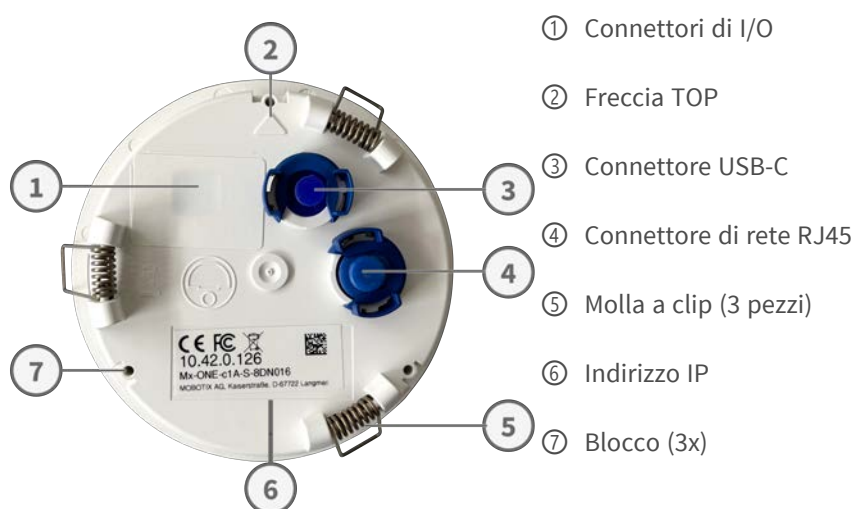

Specifiche tecniche

Informazioni sull'ordine	18
Hardware	18
Proprietà di immagini e video	20
App Kepler NurseAssist - Specifiche tecniche	20
Caratteristiche generali del software	23
Ulteriore analisi video	24
Sistemi di chiamata infermieri / Software di gestione video	24
Dimensioni	25

Informazioni sull'ordine

Nome	MOBOTIX c ONE NurseAssist <i>realizzato da Kepler Vision Technologies</i>
Codice d'ordine:	Mx-ONE-c1A-S-NurseAssist
	NOTA! Questo codice d'ordine riguarda esclusivamente l'hardware del sensore NurseAssist. Le funzionalità di analisi richiedono una licenza di abbonamento separata (Base, estesa o posizione supina).

Hardware

Caratteristica	Proprietà								
Sensore di immagine (DN)	4K (1:1), risoluzione massima effettiva 2160x2160								
Sensibilità alla luce	Modalità diurna (a colori): 0,1 lx a 1/60 s; 0,005 lx a 1 s Modalità notturna (bianco e nero): 0,02 lx a 1/60 s; 0,001 lx a 1 s								
Controllo dell'esposizione	Modalità manuale e automatica da 1 s a 1/16.000 s								
Classe di protezione IP / NEMA	IP40								
Uso previsto	Non destinato all'uso in aree pericolose (aree Ex)								
Intervallo di temperatura operativa	da -20 a 40 °C / da -4 a 104 °F								
Memoria interna del DVR	Scheda interna microSD (SDHC/SDXC), 64 GB in dotazione, max. 2 TB.								
Dimensioni consentite per i cavi collegati ai terminali del PCB	<i>Sezione del conduttore</i> <table><tr><td>AWG</td><td>20 - 26</td></tr><tr><td>Rigido</td><td>0,14mm² - 0,5mm²</td></tr><tr><td>Flessibile</td><td>0,14mm² - 0,5mm²</td></tr><tr><td>Flessibile con ghiera</td><td>0,25 mm² - 0,34 mm²</td></tr></table>	AWG	20 - 26	Rigido	0,14mm ² - 0,5mm ²	Flessibile	0,14mm ² - 0,5mm ²	Flessibile con ghiera	0,25 mm ² - 0,34 mm ²
AWG	20 - 26								
Rigido	0,14mm ² - 0,5mm ²								
Flessibile	0,14mm ² - 0,5mm ²								
Flessibile con ghiera	0,25 mm ² - 0,34 mm ²								
Ingresso	Chiusura a contatto (non è necessario l'isolamento galvanico) o fino a 30 Vrms AC / 50V DC Soglie di commutazione ■ L'ingresso >1,6V porta a un valore HIGH rilevato. ■ L'ingresso <0,9V porta a un valore LOW rilevato (dopo un HIGH). Lunghezza massima dei cavi: 50 m								
Uscita	1 contatto a secco, forma A (max 30 Vrms / max 50 V CC / 60 W / 2 A CC)								

Caratteristica	Proprietà
Microfono/altoparlante	Microfono integrato: ■ Sensibilità: -35 dB $\pm$ 4 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) Altoparlante integrato: ■ 0,9 W a 8 ohm 1 altoparlante esterno (opzionale)
Illuminazione integrata	LED a infrarossi, 850 nm, fino a 25 m²/269 ft² (potrebbe essere maggiore a seconda della scena) Luce bianca per l'illuminazione di emergenza
Rilevamento delle manomissioni	Sensore d'urto integrato
Consumo massimo di energia	12,95 W
Protezione dalle sovratensioni elettriche	tramite una Overvoltage Protection Box (scatola di protezione da sovratensione; non compresa nella fornitura)
Standard PoE	PoE (802.3af-2003) / Class 3
Interfacce	■ Ethernet 1000BaseT (RJ45 secondo EIA/TIA-568B) ■ USB-C / USB 2.0 ad alta velocità Potenza in uscita 5,1 V / 0,9 A / 4,5 W ■ Alimentazione 12-24 V CC ■ I/O digitali: 1 ingresso / 1 uscita
Led di stato	multicolore (7 colori)
Opzioni di montaggio	Installabile a incasso nel soffitto; a parete tramite accessori opzionali
Dimensioni (Ø x altezza)	120 x 54 mm/4,72 x 2,13 pollici
Peso	360 g
Alloggiamento	PBT-30GF
Accessori standard	
Documentazione tecnica dettagliata	www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Marketing e documentazione
MTBF	100.000 ore
Certificati	EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Parte 15b, NRTL
Protocolli	DHCP (client e server), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, NFS, NTP (client e server), MQTT, RTP, RTCP, RTSP, SFTP, SIP (client e server), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, TCP, UDP, VLAN, VPN, Zeroconf/mDNS
Garanzia del produttore	5 anni

Proprietà di immagini e video

Caratteristica	Proprietà
Codec video disponibili	H.264, H.265, MxPEG+, MJPEG
Risoluzioni di immagine	CIF (320x240; 4:3), nHD ² (360x360; 1:1), nHD (640x360; 16:9), VGA (640x480; 4:3), SVGA (800x600; 4:3), XGA (1024x768; 4:3), HD ² (720x720; 1:1), HD (1280x720; 16:9), Mega (1280x960; 4:3), FullHD ² (1080x1080; 1:1), FullHD (1920x1080; 16:9), QXGA (2048x1536; 4:3), UltraHD ² (2160x2160; 1:1), dimensioni personalizzate
Multi streaming	H.264, H.265 con triplo streaming
Flusso multicast via RTSP	Sì
Frequenza massima dei fotogrammi	MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K, H.265: 30@4K

App Kepler NurseAssist - Specifiche tecniche

Generale

Nome del prodotto	App Kepler NurseAssist
Codice d'ordine	Basic Starter (Kit base): Mx-ONE-APP-KEP-NUA-1S/ -2S/ -3S/ -4S/ -5S Extended (estesa): Mx-ONE-APP-KEP-NUA-EXT-1/ -2/ -3/ -4/ -5 Lying Position (posizione supina): Mx-ONE-APP-KEP-NUA-LPO-1/ -2/ -3/ -4/ -5
Telecamere MOBOTIX compatibili	c ONE NurseAssist
Firmware minimo della telecamera	v8.2.x.x
Compatibilità con MxManagementCenter	- min. MxMC v2.9.x - Ricerca eventi: licenza Smart Data Interface inclusa

Funzionalità del software NurseAssist in base ai livelli di licenza

NurseAssist Basic (base)

- monitoraggio del benessere dei pazienti nelle camere private, nei corridoi e nelle aree comuni delle strutture sanitarie.
- riduzione al minimo dei tempi di reazione grazie a un sistema decentralizzato e all'avanguardia di rilevamento delle cadute.
- prevenzione degli incidenti tramite il rilevamento di eventi quali “persona a terra”, “persona a letto” e “persona fuori dal letto”.
- rilevamento e localizzazione automatizzati del letto nella stanza del paziente.
- Funzionamento conforme al GDPR grazie all'oscuramento controllato dagli eventi delle immagini live e registrate.
- Mascheramento dinamico di una persona a letto come misura aggiuntiva di tutela della privacy.
- Monitoraggio continuo delle funzioni dei sensori e dei processi di analisi tramite l'app Heartbeat
- * Comunicazione bidirezionale via IP tramite microfono e altoparlante integrati
- * L'analisi del livello di rumore consente di rilevare rumori ambientali forti (ad esempio, urla ad alto volume).
- Rilevatore di urti integrato per rilevare manomissioni fisiche o vibrazioni
- Funzioni aggiuntive di monitoraggio dello stato dei dispositivi, tra cui il monitoraggio della connettività e del tempo di attività
- Visualizzazione configurabile dello stato del sistema tramite LED di stato del sensore
- L'interfaccia REST API consente un'integrazione completa e il controllo remoto di tutte le funzioni dei sensori

NOTA!

*Le funzioni audio del sensore sono disattivate per impostazione predefinita e, se necessario, vengono attivate da un amministratore autorizzato.

NurseAssist Extended (esteso) È necessaria una licenza Plug-In per estendere le notifiche di stato e di allarme di NurseAssist con le seguenti funzioni:

- Persona si sta alzando dal letto
- Persona è seduta sul bordo del letto
- Persona si sta alzando da una sedia
- Persona è entrata in bagno / si trova in bagno
- Persona ha lasciato la stanza
- Persona è entrata nella stanza
- Il letto non viene riconosciuto / non è presente
- Distinzione tra una persona sdraiata e una seduta sul pavimento

NOTA!

La licenza del plug-in richiede un sensore intelligent MOBOTIX NurseAssist o l'app certificata Kepler NurseAssist con licenza.

Specifiche tecniche

App Kepler NurseAssist - Specifiche tecniche

NurseAssist Lying Position (posizione supina)	Licenza che consente di estendere le notifiche di stato e di allarme di base di NurseAssist con le seguenti funzioni: ■ Monitoraggio continuo della posizione in cui una persona giace a letto (ad esempio, supina, sul fianco sinistro, sul fianco destro) ■ Monitoraggio della permanenza prolungata nella stessa posizione ■ Notifica nel caso in cui una persona non abbia modificato la propria posizione distesa per un determinato periodo di tempo ■ Supporto per piani di assistenza personalizzati e procedure di prevenzione delle piaghe da decubito ■ Integrazione nella logica di allarme e nel sistema di segnalazione esistenti
---	--

Requisiti della scena

Dimensioni della stanza	max. 25 m ² , ipotizzando una stanza quasi quadrata (ad es. 5x5 m) con un raggio di 4 m – le stanze lunghe e strette non sono adatte.
Posizione di installazione richiesta (telecamera)	montaggio a soffitto
Altezza di installazione consigliata (telecamera)	2,0 m - 3,5 m
Distanza di montaggio dal letto	0,5 m - 3,0 m
Distanza di montaggio dalla parete	> 70 cm

Caratteristiche generali del software

Caratteristica	Proprietà
WDR	Fino a 120 dB
Caratteristiche del software	■ Multistreaming H.264, H.265 ■ Flusso multicast via RTSP ■ Pan, tilt e zoom digitali/vPTZ (zoom fino a 8x) ■ Integrazione del protocollo Genetec ■ Zone di esposizione programmabili ■ Registrazione di istantanee (immagini pre/post-allarme) ■ Registrazione continua ■ Registrazione degli eventi ■ Logica degli eventi flessibile e temporizzata ■ Programmi settimanali per le registrazioni e le azioni ■ Trasferimento di immagini e video di eventi via FTP e via e-mail ■ Riproduzione e QuadView tramite browser web ■ Loghi animati sull'immagine ■ Funzionalità master/slave ■ Programmazione della zona di privacy ■ Notifica di allarme a distanza (messaggio di rete) ■ Interfaccia di programmazione (HTTP-API) ■ MxMessageSystem ■ MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
Compatibilità ONVIF	Profilo G, S, T
Funzionalità master/slave	Sì
Notifica di allarme a distanza	E-mail, MQTT, MxMessageSystem, messaggi di rete (HTTP/HTTPS), SNMP, SIP
DVR/immagazzinamento delle immagini gestione	■ Su scheda microSD interna ■ Sui dispositivi esterni USB e NAS ■ Diversi flussi per immagini live e registrazione ■ MxFFS con archivio bufferizzato, immagini pre- e post-allarme, monitoraggio dello storage con segnalazione degli errori
Sicurezza delle telecamere e dei dati	Crittografia certificata FIPS 140-3 (OpenSSL 3.1.2, NIST CMVP n. 4985), VPN con libreria certificata FIPS, HTTPS con certificati X.509 personalizzati (TLS), crittografia AES dei dati inattivi (microSD / NAS), controllo degli accessi basato sui ruoli, lista di controllo degli accessi a livello di IP, audit trail / registro degli accessi al server web, rilevamento delle intrusioni con blocco automatico dell'IP, controllo degli accessi di rete basato su porta secondo lo standard IEEE 802.1X, firma digitale delle immagini
Rilevamento delle manomissioni del firmware	Firma digitale

Ulteriore analisi video

Caratteristica

Proprietà

Rilevamento del movimento video Sì

MxActivitySensor

Versione 1.0, 2.1

Sistemi di chiamata infermieri / Software di gestione video

Caratteristica

Proprietà

Sistemi di chiamata infermieri di terze parti Ampiamente integrato; le integrazioni documentate sono disponibili all'indirizzo: community.mobotix.com > **MOBOTIX 7 app certificate** > **Kepler NurseAssist**

MOBOTIX HUB

Supportato, compatibile con la dashboard di MOBOTIX HUB NurseAssist

www.mobotix.com > **Servizi** > **Centro di download** > **Download di software**

MxManagementCenter

Sì (si consiglia l'ultima versione)

www.mobotix.com > **Servizi** > **Centro di download** > **Download di software**

MOBOTIX LIVE App

Sì (disponibile su Google Play Store (Android) e Apple App Store (iOS)).

Software VMS di terze parti

Vedi specifiche ONVIF profilo S, T e G

Dimensioni

NOTA!

Sagoma di foratura: www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Marketing e documentazione > Modelli di perforazione.

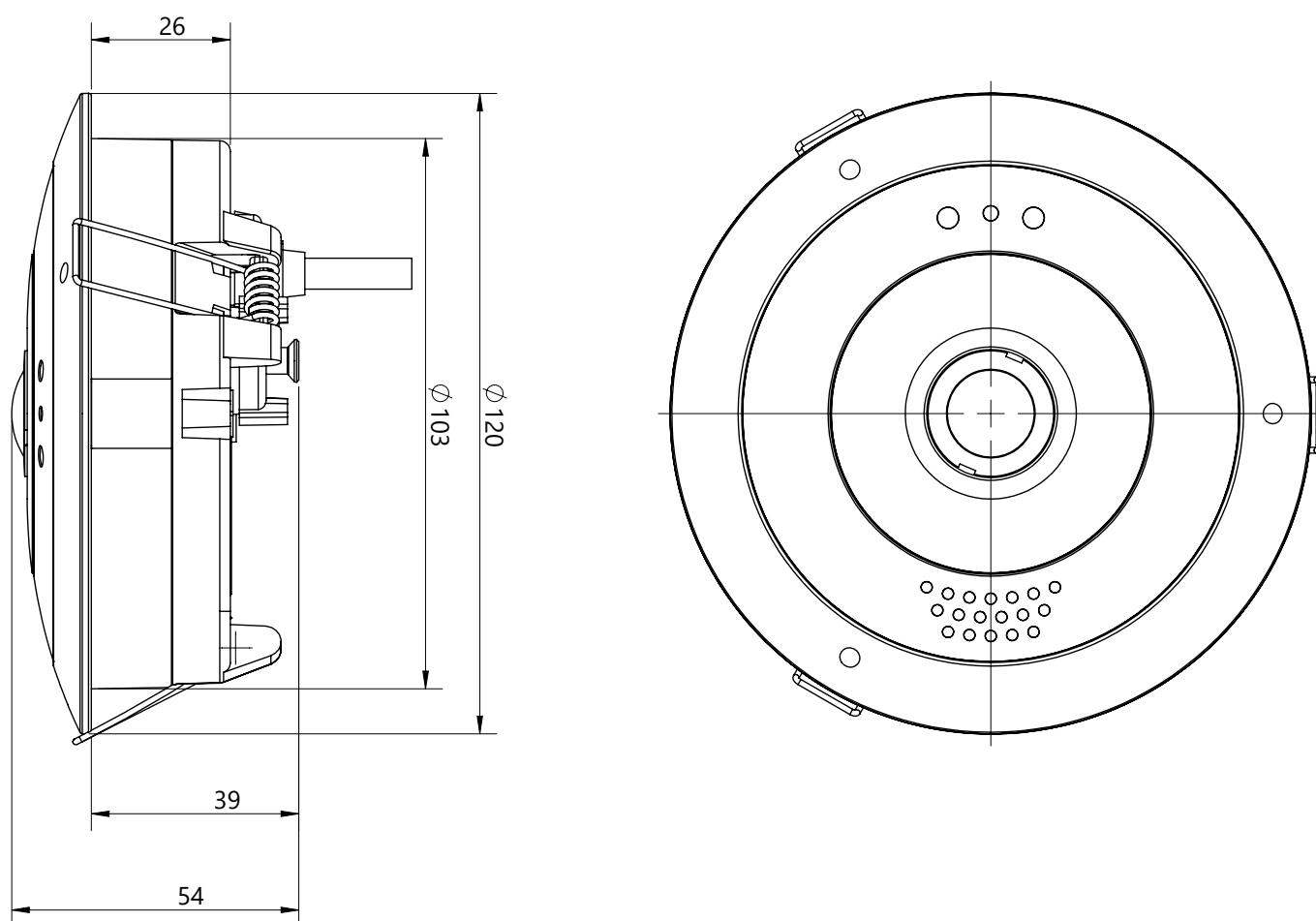


Fig. 1: MOBOTIX c ONE: Tutte le misure sono espresse in mm

Montaggio

Prima di montare la telecamera	28
Rimozione della piastra posteriore	28
Montaggio della piastra posteriore	29
Collegamento della telecamera	30
Opzioni di montaggio	33
Regolazione dell'obiettivo della telecamera	39

Prima di montare la telecamera

NOTA!

Per accedere alla telecamera in rete, ti servirà il suo indirizzo IP (vedi [Software della telecamera nel browser, p. 49](#)).

Prima di installare la telecamera, assicurarsi di annotare l'indirizzo IP ① riportato sul retro dell'alloggiamento della telecamera (vedere [Retro, p. 16](#)) o sulla confezione della telecamera.

La MOBOTIX c ONE è progettato principalmente per il montaggio a soffitto. Con gli accessori adeguati, può essere installato in un angolo, su un palo o in altre posizioni di montaggio.

- Montaggio a soffitto (vedere [Installazione a filo soffitto, p. 33](#))

NOTA!

Sagoma di foratura: www.mobotix.com > [Servizi](#) > [Centro di download](#) > [Marketing e documentazione](#) > [Modelli di perforazione](#).

Prima di montare il sito MOBOTIX c ONE, è necessario rispondere alle seguenti domande:

- Dove e come verrà montata la telecamera?
- Qual è il livello della superficie di montaggio?
- Quali altre opzioni di montaggio sono disponibili?
- Quali accessori potrebbero essere necessari?
- Come è collegata la telecamera alla rete e come viene alimentata?
- Come sono arredati i collegamenti dall'edificio?
- Quali considerazioni sul cablaggio sono necessarie?
- Si desidera utilizzare una scheda SD più grande (vedere [Sostituzione della scheda microSD, p. 54](#))?

Le sezioni seguenti risponderanno a queste domande. Se avete altre domande, rivolgetevi al vostro partner MOBOTIX o contattate l'assistenza MOBOTIX alla voce www.mobotix.com > [Servizi](#) > [Help Desk](#).

Rimozione della piastra posteriore


Per eseguire le seguenti operazioni è necessario aprire l'alloggiamento della telecamera:

- [Sostituzione della scheda microSD, p. 54](#).


1. Per rimuovere la piastra posteriore, è necessario inserire l'attrezzo di smontaggio [Materiali di consumo per il montaggio: Volume di fornitura, p. 13](#) in dotazione nei tre fori sul retro, uno dopo l'altro, per sbloccare le linguette di fissaggio (vedere i cerchi rossi nella figura).



2. Inserire l'attrezzo di smontaggio in un foro e premere con decisione fino a sentire un arresto ①.

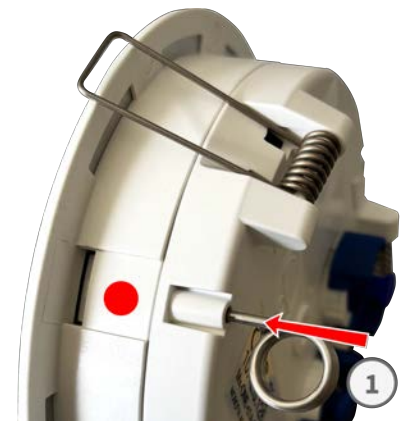

3. Premere delicatamente contro il fermaglio a molla più vicino per far uscire il fermo dalla sua sede e sollevare la piastra posteriore dall'alloggiamento ②. Ripetere la procedura per gli altri due fermi.
4. Rimuovere il coperchio dall'alloggiamento della telecamera.

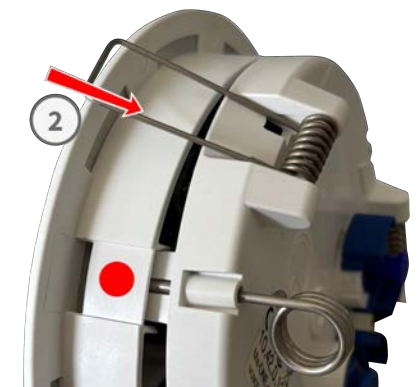

Montaggio della piastra posteriore


ATTENZIONE!

Prima di fissare la piastra posteriore, assicurarsi che la scheda SD sia correttamente fissata in posizione, poiché in caso contrario la scheda potrebbe danneggiarsi.

Montaggio

Collegamento della telecamera

1. Posizionare la linguetta di bloccaggio superiore (contrassegnata da una freccia sul coperchio dell'alloggiamento) sopra la scheda SD. Quindi premere delicatamente la piastra posteriore fino a quando tutte e tre le linguette di bloccaggio non scattano in posizione.

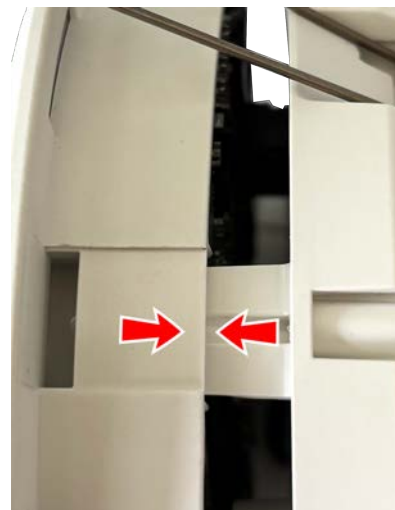

Collegamento della telecamera

Tutti i collegamenti alla telecamera (rete, USB-C, ingressi/uscite) possono essere effettuati direttamente sulla telecamera. Non sono necessari altri accessori. L'alimentazione della telecamera è fornita da uno switch PoE.

Collegamento di un dispositivo USB-C

La telecamera è dotata di una porta USB-C che consente di collegare supporti di memorizzazione esterni o box di estensione, ad esempio.

1. Per accedere alla porta USB-C, aprire il fermo a baionetta blu ① del blocco della spina ruotandolo in direzione opposta al tappo di tenuta, quindi rimuovere il tappo di tenuta.



2. Collegare il cavo USB alla presa USB in modo che il piccolo connettore si inserisca correttamente nella presa USB.
3. Fissare il fermo a baionetta.
4. Collegare il dispositivo USB-C al cavo USB.



Collegamento dei dispositivi di I/O

Il sito MOBOTIX c ONE è dotato di un terminale di connessione I/O che consente di collegare più dispositivi I/O.

Assegnazione dei pin dei connettori I/O




In + Fuori + Spk + DC +

In - Fuori - Spk - DC -

ATTENZIONE!

Prima di procedere, prestare attenzione all'uso previsto o alla polarità degli slot. Assicurarsi che i collegamenti siano assegnati correttamente, come indicato nello schema generale sopra riportato.


1. Sul retro della telecamera, rimuovere l'adesivo ① che copre il connettore del blocco terminale I/O.

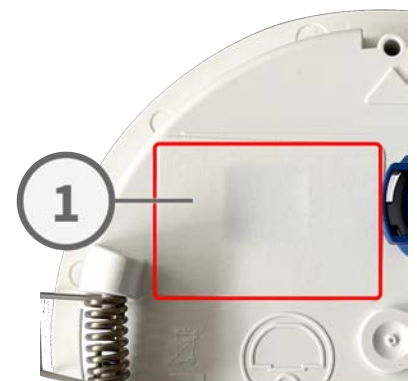

Montaggio

Collegamento della telecamera

2. Inserire il blocco morsetti I/O ② nel connettore I/O fino a quando non è completamente inserito.

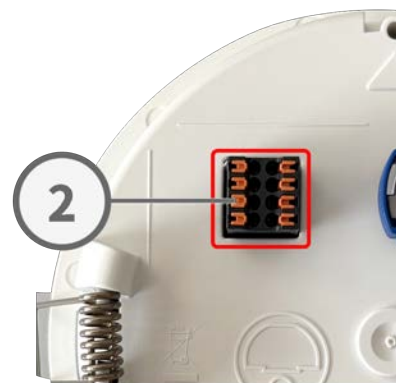

3. Spellare 5 mm di isolante dalle estremità dei cavi di collegamento dei dispositivi I/O, inserirli nelle rispettive unità negli slot corrispondenti ② (vedere [Assegnazione dei pin dei connettori I/O, p. 31](#)) del terminale di collegamento e verificare che siano ben fissati.



Collegamento della telecamera alla rete

ATTENZIONE!

- Lo switch PoE deve fornire la Classe 4 secondo PoE (802.3af-2003) / Class 3 e l'interfaccia Ethernet 100/1000 Mbps della telecamera.
- Si consiglia di utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per lo switch.
- La lunghezza massima del cavo di rete per l'alimentazione remota è di 100 m (300 ft).

1. **NOTA!**

Si consiglia di collegare la telecamera all' MX-Overvoltage-Protection-Box e (RJ45 o LSA). Ciò garantisce una connessione di rete e di alimentazione resistente alle intemperie (IP66) con protezione contro le sovratensioni fino a 4 kV (fare riferimento al manuale corrispondente dal sito web MOBOTIX www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Marketing e documentazione).

Opzioni di montaggio

La telecamera può essere installata a filo in un controsoffitto senza accessori aggiuntivi. In alternativa, può essere installata a soffitto o in un angolo utilizzando il kit di montaggio a parete MOBOTIX o il kit di montaggio ad angolo, entrambi disponibili come accessori opzionali.

NOTA!

Prima di montare la telecamera

- Individuare la posizione ottimale per l'installazione e assicurarsi che il campo visivo non sia ostruito. Una volta completata l'installazione, è possibile effettuare una regolazione di precisione dell'immagine.
- Assicurarsi che nel luogo di installazione sia disponibile un alimentatore PoE conforme allo standard PoE (802.3af-2003) / Class 3 .

Installazione a filo soffitto


1. Utilizzare la dima di foratura oppure tracciare un cerchio del diametro di 105 mm/4,13 pollici per il foro ① (vedere [Modello di foratura](#), p. 9).
2. Ritaglia il foro per la telecamera, quindi fai passare attraverso il foro il cavo Ethernet e qualsiasi altro cavo che desideri collegare alla telecamera.
3. Inserire i cavi nei connettori corrispondenti e fissarli utilizzando i fermi a baionetta blu (vedere [Retro](#), p. 16).



Montaggio

Opzioni di montaggio

4. Assicurati che la telecamera sia orientata nella direzione desiderata: l'icona a forma di freccia sul retro indica la direzione "verso l'alto" dell'immagine.
5. Premere i fermagli a molla verso l'esterno e inserire la c ONE nel foro destinato alla telecamera. I fermagli a molla si apriranno verso l'esterno, fissando saldamente la telecamera in posizione.
6. Assicurati di spingere indietro i fermagli a molla solo come mostrato a destra ② . Non spingerli oltre, altrimenti le molle potrebbero staccarsi dai loro alloggiamenti.

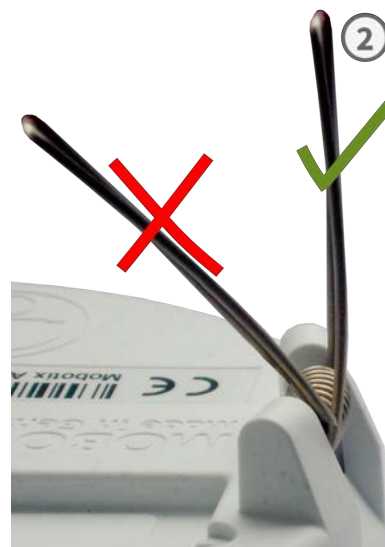

Rimozione della telecamera dal soffitto

Tirare delicatamente verso il basso un lato della telecamera per sganciarla, quindi ripetere la procedura sull'altro lato.



ATTENZIONE!


Pericolo di lesioni! Evitare che le clip a molla scattino in avanti ① .

1. Scollegare tutti i cavi collegati alla telecamera (ad esempio, il cavo di rete e il cavo USB).
2. Rimuovere la telecamera dal soffitto.

Installazione a filo soffitto

Preparazione della telecamera

1. **Rimuovere i fermagli a molla:** indossare gli occhiali di protezione per questa operazione. Utilizzando un piccolo cacciavite a testa piatta, esercitare una pressione sul fermaglio come indicato dalla freccia rossa. A questo punto i fermagli possono essere rimossi facilmente.

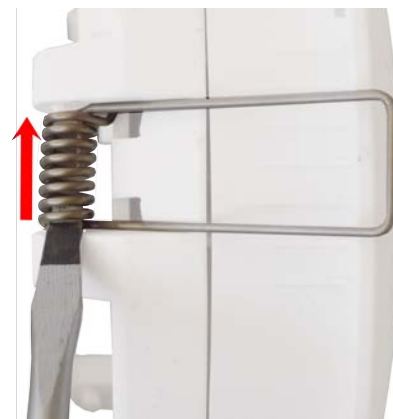

2. **Fissare l'anello di montaggio:** posizionare l'anello di montaggio (XRF) sulla telecamera, assicurandosi che il segno triangolare presente sull'anello di montaggio sia allineato con il segno triangolare presente sulla telecamera.



Preparazione del Set di montaggio a parete

1. **Sostituire i raccordi per cavi (opzionale):** se si fanno passare i cavi attraverso il lato dell'alloggiamento anziché dalla parte posteriore, sostituire uno o entrambi i tappi filettati con i raccordi per cavi in dotazione. Utilizzare una moneta adatta per svitare il tappo filettato.



Montaggio

Opzioni di montaggio

2. **Preparazione delle scatole di interfaccia (opzionale):** all'interno del kit di montaggio a parete è possibile installare fino a due schede per scatole di interfaccia. Per preparare una scatola di interfaccia, rimuovere il coperchio (tre viti). Quindi utilizzare la chiave Torx TX6 in dotazione per rimuovere le due viti (freccette rosse nella figura) ed estrarre la scheda.




3. **Preparare l'installazione di Set da parete:**

NOTA! Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per installare il kit di montaggio a parete e che questo rimanga accessibile dal retro o dal lato. La superficie di montaggio deve essere piana e liscia per garantire una tenuta adeguata.

Utilizzare la dima di foratura del presente documento per praticare i fori di fissaggio. Se necessario, inserire i tasselli in dotazione.

Far passare i cavi dal retro o dal lato fino al luogo di installazione.

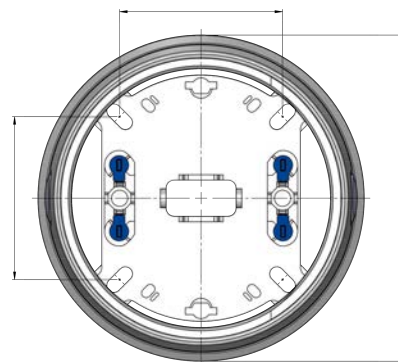

Installazione di Set di montaggio a parete

1. **Installare la presa a muro:** posizionare la guarnizione sul retro della presa a muro. Assicurarsi che i fori della guarnizione siano allineati con quelli della piastra posteriore della presa a muro (freccette rosse nella figura).

Se necessario, far passare i cavi attraverso le aperture posteriori della presa a muro e la guarnizione.

Posizionare la presa a muro e la guarnizione sui fori praticati e fissare la presa a muro utilizzando le viti da Ø 4,3 mm in dotazione con le rondelle (art. 1.8, coppia di serraggio: 0,4 Nm).




2. Installare le schede dell'Interface Box (opzionale):

Collegare i cavi necessari a ciascuna scheda della scatola di interfaccia.

Inserire la scheda dell'interfaccia nelle guide (in rosso nella figura) e farla scorrere fino alla posizione finale.

Ruotare le linguette di fissaggio (in blu nella figura) di 90° sulla scheda per fissarla.

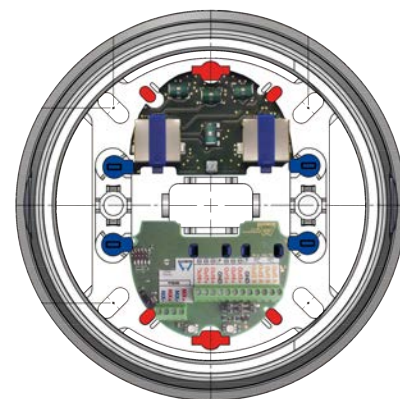

3. Collegare la telecamera:

Se si utilizzano scatole di interfaccia, collegare i cavi corrispondenti alla telecamera.

NOTA! Per informazioni sull'installazione delle scatole di interfaccia, consultare la documentazione corrispondente.

Collegare la telecamera alla rete.

Se necessario, fissare i cavi e i fili sciolti utilizzando le fascette in dotazione (voce [XRF](#), vedi figura).



4. Inserire la telecamera:

Posizionare la telecamera con l'anello di montaggio in dotazione sul kit di montaggio a parete. Assicurarsi che nessun cavo o filo rimanga incastrato tra l'anello di montaggio e il bordo del kit di montaggio a parete.

Premere con decisione sul bordo esterno della telecamera, come illustrato nella figura, finché non si sente un clic che indica che la telecamera è stata inserita correttamente. Non premere sul modulo del sensore né sull'obiettivo.

Orientare la telecamera nella direzione di ripresa desiderata.

5. Completa l'installazione:

Collegare la telecamera all'alimentatore e completare la configurazione iniziale come descritto nel manuale della telecamera. Verificare l'immagine in tempo reale e, se necessario, regolare la telecamera.



Rimozione della telecamera

1. **Orientare la telecamera verso il segno:** ruotare la telecamera finché il microfono non è allineato con il segno ① sopra il tappo filettato.



2. **Premere con decisione la telecamera verso il basso:**

Premere con decisione sulla telecamera nei punti indicati dai cerchi rossi fino a quando la telecamera non si inclina verso l'interno e il lato opposto si solleva.



3. **Rimuovere la telecamera:**

Estrai la telecamera dall'Set di montaggio a parete.

Scollegare il cavo di rete e qualsiasi altro cavo o filo collegato alla telecamera.



Regolazione dell'obiettivo della telecamera

NOTA!

L'obiettivo della telecamera è già messo a fuoco in fabbrica, quindi questo passaggio di solito non è necessario.

La regolazione della telecamera nella posizione di montaggio garantirà in seguito la visione del campo visivo desiderato.

ATTENZIONE!

Quando si regola la messa a fuoco dell'immagine o il campo visivo della telecamera, accertarsi sempre di poter vedere l'immagine live della telecamera sul monitor. Vedere [Software della telecamera nel browser, p. 49](#).

Regolazione e messa a fuoco dell'obiettivo della telecamera

1. Metti a fuoco l'obiettivo ① ruotandolo con la chiave del modulo MultiTool [M.2, p. 13](#).
2. Se necessario, pulire le superfici ottiche con un panno di cotone pulito e privo di pelucchi.



Utilizzo della telecamera

Come iniziare	42
Impostazioni di rete	42

Come iniziare

È possibile utilizzare MOBOTIX c ONE con qualsiasi browser attuale o con MxManagementCenter.

NOTA!

È possibile scaricare gratuitamente MxManagementCenter da www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > [Download di software](#) .

1. **Stabilire una connessione con la telecamera:** Seguire le istruzioni su come accedere alla telecamera come indicato in [Impostazione iniziale della telecamera, p. 42](#).
2. **Configurare la telecamera:** È possibile utilizzare l'interfaccia utente della telecamera in un browser o in MxManagementCenter.

Stati dei LED

Il LED della telecamera sulla parte superiore del corpo macchina visualizza i seguenti stati per impostazione predefinita:

Stato del LED	Significato
Tutto spento	Funzionamento normale
Luce blu fissa accesa	NurseAssist Allarme (ad es. persona seduta o sdraiata sul pavimento)

Impostazioni di rete

Impostazione iniziale della telecamera

Controllare le precondizioni

- La telecamera è in funzione (controllare il LED di alimentazione della telecamera)?
- La telecamera è accessibile con la mia attuale connessione di rete?
- Sono disponibili le informazioni necessarie per far funzionare correttamente la telecamera in rete?
 - Indirizzo IP del server NTP (*Network Time Protocol*).
 - Indirizzo IP del gateway di rete (se richiesto).

Accesso alla telecamera

1. Avviare il browser Web.
2. Accedere alla telecamera utilizzando il suo indirizzo zeroconf:
 - Cercare l'indirizzo IP di fabbrica come 10.x.y.z sull'adesivo del corpo macchina o sulla confezione.
 - Inserire questo indirizzo nella barra degli indirizzi del browser utilizzando la seguente sintassi: mx10-x-y-z.local.

ESEMPIO:


Prendendo come esempio un indirizzo IP di fabbrica di 10.32.24.129, si dovrebbe inserire mx10-32-24-129.local nella barra degli indirizzi del browser.

- Fai clic sul **menu “Amministrazione”** e inserisci le credenziali di accesso predefinite (admin / meinsm).
3. Nella finestra di dialogo **Installazione rapida**, selezionare la lingua, quindi fare clic su .



4. Continuare a fare clic su  e non modificare alcuna impostazione finché non si raggiunge la finestra di dialogo **Sicurezza**.

Impostare una password per l'utente amministratore della telecamera. Assicurarsi di conservare la password in un luogo sicuro.

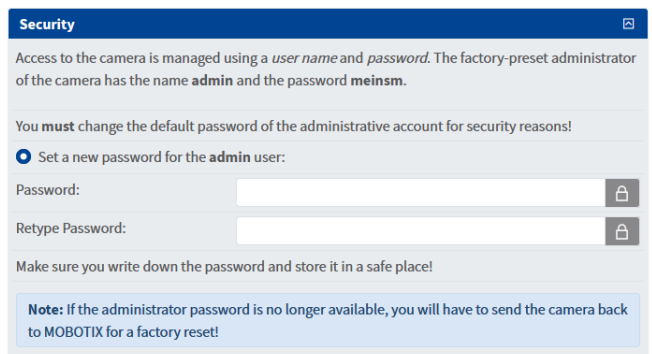


NOTA!


Assicurarsi di registrare la nuova password nella documentazione del sistema!

5. Continuare a fare clic su  e non modificare alcuna impostazione finché non si raggiunge la finestra di dialogo **Impostazioni geografiche**.


Controllare il fuso orario e regolarlo, se necessario.

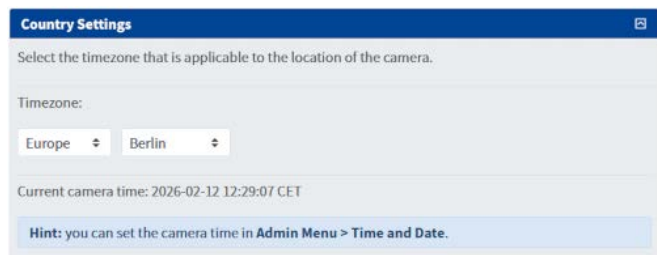

6. Fare clic su  e nella finestra di dialogo **Impostazioni audio** attivare i dispositivi disponibili per questa telecamera.

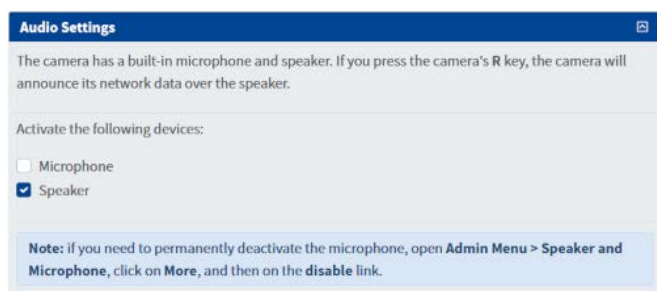

7. Fare clic su  e nella finestra di dialogo **Nome telecamera** inserire un nome descrittivo della telecamera.

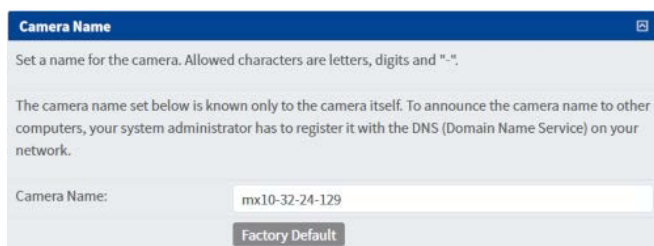

Camera Name

Set a name for the camera. Allowed characters are letters, digits and "-".

The camera name set below is known only to the camera itself. To announce the camera name to other computers, your system administrator has to register it with the DNS (Domain Name Service) on your network.

Camera Name:


Factory Default

NOTA!

Assicurarsi di registrare il nome della telecamera nella documentazione del sistema!

8. Continuare a fare clic su  e non modificare alcuna impostazione finché non si raggiunge la finestra di dialogo **Time Server**.

Inserire l'indirizzo IP dei server orari di rete fornito dall'amministratore di rete (ad esempio 192.168.1.1 ptb-time1.ptb.de; utilizzare gli spazi per separare più indirizzi).

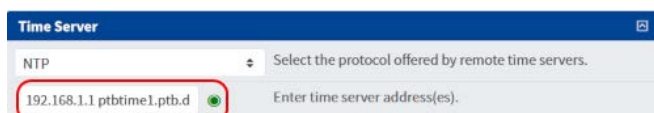


Time Server

NTP  Select the protocol offered by remote time servers.

192.168.1.1 ptbtime1.ptb.d  Enter time server address(es).

Se il time server funziona correttamente, il LED a destra del campo diventa verde. Un LED rosso indica che il server non funziona correttamente.

9. Fare clic su  e rivedere le informazioni nella finestra di dialogo **Memorizza configurazione**. Se tutto è corretto, stampare la pagina e includerla nella documentazione del sistema.

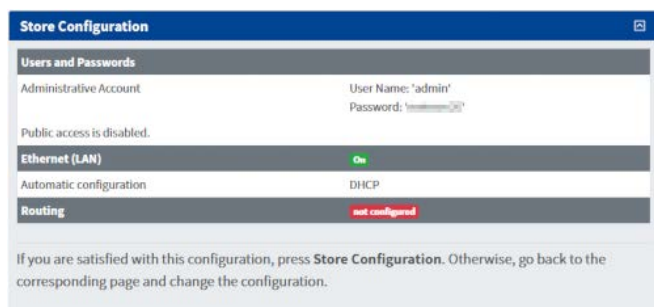

Store Configuration

Users and Passwords

Administrative Account User Name: 'admin' Password:

Public access is disabled.


Ethernet (LAN) On

Automatic configuration DHCP

Routing not configured

If you are satisfied with this configuration, press **Store Configuration**. Otherwise, go back to the corresponding page and change the configuration.

10. Fare clic su **Memorizza configurazione** e poi su **Riavvia**.

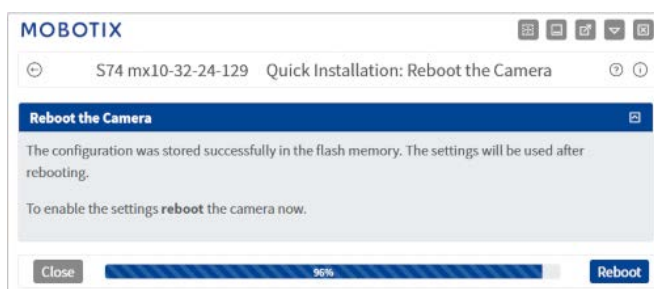

MOBOTIX

S74 mx10-32-24-129 Quick Installation: Reboot the Camera

Reboot the Camera

The configuration was stored successfully in the flash memory. The settings will be used after rebooting.

To enable the settings **reboot** the camera now.


Close  **Reboot**

11. Immettere la nuova password inserita nella finestra di dialogo **Sicurezza** quando la telecamera lo richiede.
La telecamera si riavvierà ora; una volta che sarà nuovamente operativa, potrai vedere l'immagine in diretta.

Trovare l'indirizzo IP "reale" della telecamera

Poiché si utilizza ancora l'indirizzo IP di zeroconf `mx10-32-24-129.local`, è necessario scoprire l'indirizzo IP effettivo della telecamera.

1. Fare clic sull'icona **Mostra stato telecamera** .
2. Nella finestra di dialogo **Stato della telecamera**, fare clic su **Rete**.
 - La voce **Nome telecamera** mostra il nome di dominio completamente qualificato della telecamera.
 - Lo stato **BOOTP/DHCP** "*Client in esecuzione, lease ottenuto*" indica che la telecamera ha ricevuto correttamente un indirizzo IP.
 - Il campo "**Indirizzo IP**" mostra l'indirizzo attuale della telecamera.
3. D'ora in poi potrai accedere alla telecamera utilizzando sia il **nome della telecamera** (ad es. `mx10-32-24-129.fritz.box`) sia l'indirizzo IP (ad es. `192.168.1.210`).
4. Aprire una nuova scheda del browser e inserire l'indirizzo (ad esempio, `mx10-32-24-129.fritz.box` o `192.168.1.210`), quindi inserire le credenziali di accesso (`admin/<la nuova password>`).

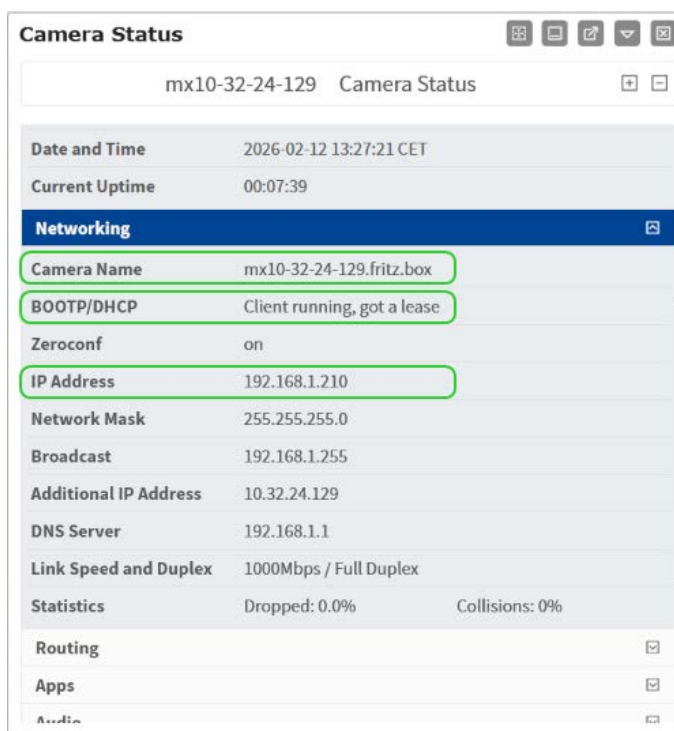

The screenshot shows the 'Camera Status' window for the device 'mx10-32-24-129'. The 'Networking' section is expanded, showing the following details:

Camera Status	
Date and Time	2026-02-12 13:27:21 CET
Current Uptime	00:07:39
Networking	
Camera Name	mx10-32-24-129.fritz.box
BOOTP/DHCP	Client running, got a lease
Zeroconf	on
IP Address	192.168.1.210
Network Mask	255.255.255.0
Broadcast	192.168.1.255
Additional IP Address	10.32.24.129
DNS Server	192.168.1.1
Link Speed and Duplex	1000Mbps / Full Duplex
Statistics	Dropped: 0.0% Collisions: 0%
Routing	☒
Apps	☒
Audio	☒

NOTA!

Assicurarsi di registrare questo indirizzo nella documentazione del sistema insieme al nome della telecamera!

Impostarezione automatica con MxManagementCenter

Questa sezione descrive come utilizzare il sito MxMC per collegare la telecamera e configurare le impostazioni di rete.

MxManagementCenter è un software di gestione video per l'impostazione e l'utilizzo dell'intero sistema di video-sorveglianza che offre una serie di funzioni per diversi compiti e gruppi di utenti. È possibile scaricare l'ultima versione di MxManagementCenter dal sito web MOBOTIX (www.mobotix.com > Servizi > Centro download > Download software, sezione MxManagementCenter).

Impostazioni di rete sulla telecamera in MxMC

Quando si avvia per la prima volta il sito MxManagementCenter, si apre la configurazione guidata e si avvia automaticamente la ricerca delle telecamere MOBOTIX. Il numero di telecamere rilevate viene visualizzato accanto all'icona **Aggiungi dispositivo**. Il numero di telecamere rilevate è indicato accanto all'icona **Aggiungi dispositivi**.

1. Fare clic su **Aggiungi dispositivi**. Le telecamere vengono visualizzate in un elenco o come mattonelle. Utilizzare i pulsanti **Elenco** e **Mattonelle** per cambiare la modalità di visualizzazione.



L'applicazione monitora e visualizza automaticamente lo stato di funzionamento di tutte le telecamere utilizzando le icone corrispondenti.



ESEMPIO:

-  La telecamera non si trova nella stessa sottorete del computer.
-  Il nome utente e la password della telecamera non sono noti.

NOTA!

Utilizzando il servizio Bonjour ([en.wikipedia.org/wiki/Bonjour_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Bonjour_(software))), l'applicazione trova non solo le telecamere MOBOTIX nella stessa sottorete, ma anche in altre sottoreti. Normalmente, non è possibile stabilire una connessione con telecamere in una rete o sottorete diversa.

NOTA!

Questo è il caso, ad esempio, se si stanno integrando le telecamere in una rete senza server DHCP (cioè con indirizzi IP fissi) e l'intervallo di indirizzi IP è diverso dall'intervallo 10.x.x.x supportato dalle telecamere in aggiunta al DHCP. MxManagementCenter può configurare automaticamente una telecamera di questo tipo in modo che sia "integrata" nella rete esistente.

2. Selezionare la telecamera che si desidera impostare e fare clic su **Modifica impostazioni di rete**  nella parte inferiore della finestra del programma. Si apre la finestra di dialogo **Modifica impostazioni di rete per i dispositivi selezionati**.
3. Inserire l'indirizzo IP e la subnet mask della telecamera selezionata.



NOTA!

Gli indirizzi IP delle altre telecamere vengono incrementati automaticamente di 1.

4. Fare clic su **Applica** per applicare le impostazioni.

NOTA!

Per ulteriori informazioni su questa funzione, leggere la guida in linea di MxManagementCenter o l'esercitazione (vedere www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Documentazione > Opuscoli e guide > Esercitazioni).

Impostare le impostazioni di rete della telecamera nel browser Web

1. Utilizzare un browser web per accedere all'interfaccia web della telecamera MOBOTIX e inserire l'indirizzo IP di fabbrica (ad es. 10.16.0.99).

NOTA!

Quando si accede per la prima volta all'interfaccia web, è necessario assegnare una nuova password per l'utente amministratore.

ATTENZIONE!

Se la password dell'amministratore non è più disponibile, la telecamera deve essere restituita a MOBOTIX per un reset di fabbrica.

2. Fare clic sul pulsante **Admin Menu** nell'interfaccia utente della telecamera. L'installazione rapida si avvia automaticamente dopo aver inserito le credenziali di accesso dell'utente amministratore.

NOTA!

È possibile eseguire l'installazione rapida anche in un secondo momento (**Admin Menu > Configurazione di rete > Installazione rapida**; vedere il Manuale di riferimento).

3. Inserire i parametri di rete della telecamera nel corso dell'installazione rapida.

NOTA!

È possibile modificare i parametri di rete anche in un secondo momento, eseguendo **Admin Menu > Configurazione di rete > Installazione rapida**.


4. Riavviare la telecamera per applicare le impostazioni di rete.

Software della telecamera nel browser

Accesso alla telecamera nel browser web	50
Impostazioni di base	50

Accesso alla telecamera nel browser web

Dopo aver stabilito l'alimentazione e la connessione di rete di MOBOTIX, è possibile accedere all'interfaccia del software della telecamera in un browser web.

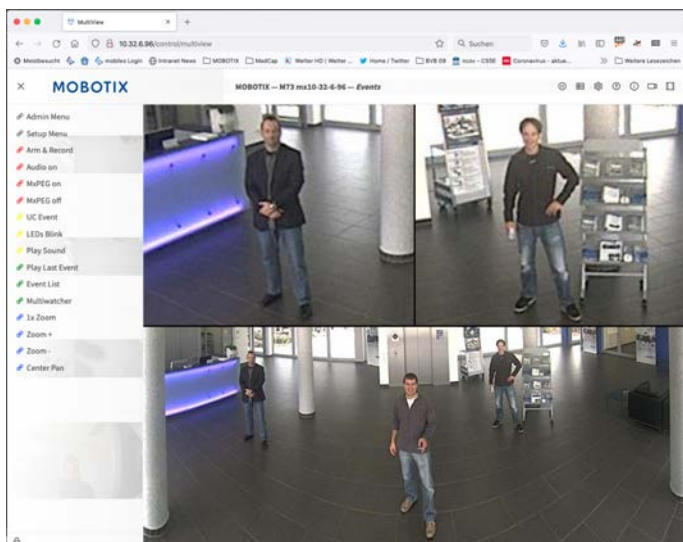

- Inserire l'indirizzo IP della telecamera nel campo dell'indirizzo di un browser web.

NOTA!

L'indirizzo IP della telecamera si trova, ad esempio, nell'alloggiamento della stessa o sull'adesivo della confezione.

Impostazioni di base

NOTA!

È necessario modificare la password al primo accesso.

ATTENZIONE!

Assicuratevi di conservare le informazioni sui nomi utente e le password in un luogo sicuro.

Se si perde la password di amministratore e non si riesce ad accedere al menu di amministrazione, la password può essere ripristinata solo in fabbrica. Questo servizio è soggetto a un costo di assistenza.

La procedura guidata di installazione rapida viene visualizzata automaticamente quando si accede per la prima volta al menu di amministrazione. Essa fornisce un metodo semplice per regolare le impostazioni di base della telecamera in base allo scenario applicativo corrente. Per motivi di sicurezza, si consiglia di modificare la password di amministratore predefinita dopo che la telecamera è stata configurata correttamente.

Amministrazione della telecamera: È possibile modificare la configurazione della telecamera nel menu Amministrazione o nel menu Configurazione:

- **Admin Menu:** Questo menu contiene le finestre di configurazione di base della telecamera (ad esempio, password, interfacce, aggiornamento del software).

- **Setup Menu:** Questo menu contiene le finestre di dialogo per la configurazione dei parametri di immagine, evento e registrazione. Alcune di queste impostazioni possono essere modificate utilizzando i controlli rapidi corrispondenti nella schermata Live.

NOTA!

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di riferimento della telecamera (vedere www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Marketing e documentazione > Manuali utente).

Manutenzione

Sostituzione della scheda microSD	54
Pulizia della telecamera	54

Sostituzione della scheda microSD

ATTENZIONE!

Rischio di danni alle apparecchiature e perdita di dati.

- Prima di rimuovere la scheda microSD, disattivare la registrazione e riavviare la telecamera.
- Scollegare la telecamera dall'alimentazione.
- Non toccare la scheda elettronica durante la sostituzione della scheda microSD.
- Assicurarsi che la scheda microSD non sia protetta da scrittura.

1. **Disattivare l'archiviazione:** se l'archiviazione su una scheda microSD è ancora attiva, disattivarla dall'interfaccia web della telecamera: **Menu Amministrazione > Archiviazione su file server esterno / dispositivo flash**, quindi riavviare la telecamera.
2. Scollegare l'alimentazione della telecamera.
3. **Aprire l'alloggiamento:** (vedere [Rimozione della piastra posteriore, p. 28](#)).
4. **Rimuovere la scheda microSD:** spingere delicatamente la scheda microSD nell'alloggiamento per sganciarla dal fermo a pressione. Quindi estrarla con delle pinzette.



5. **Inserire la scheda microSD:** Inserire con cautela la nuova scheda microSD nello slot utilizzando una pinzetta e premendola leggermente finché non scatta in posizione.
6. **Chiudere l'alloggiamento:** (vedere [Montaggio della piastra posteriore, p. 29](#)).
7. **Attiva lo spazio di archiviazione:**
 - Formattare una nuova scheda microSD seguendo le istruzioni riportate nella sezione “Archiviazione su file server esterno / dispositivo flash” della guida in linea della telecamera.
 - Se la scheda microSD è già formattata con MxFFS, è possibile attivare la memorizzazione in **Menu di amministrazione > Memorizzazione su file server esterno / dispositivo flash**. Dopo aver riavviato la telecamera, la registrazione riprenderà automaticamente.
8. **Riavviare la telecamera.**

Pulizia della telecamera

Per garantire una pulizia e una disinfezione sicure ed efficaci del sensore intelligente c ONE NurseAssist negli ambienti di cura, è importante tenere in considerazione sia l'integrità dell'apparecchiatura sia la salute e la sicurezza dei pazienti e

del personale. Data la varietà dei materiali utilizzati in questi dispositivi e la necessità di garantire una disinfezione efficace per prevenire la diffusione di infezioni, il presente documento vuole fungere da guida per aiutare a selezionare i detergenti e le procedure di pulizia adeguati per i dispositivi c ONE NurseAssist, tenendo conto sia della compatibilità dei materiali sia dei requisiti igienici negli ambienti sanitari.

Istruzioni per la pulizia e la disinfezione

Questa sezione descrive la procedura corretta per la pulizia e la disinfezione delle superfici della telecamera di sorveglianza c ONE NurseAssist, al fine di garantirne il corretto funzionamento a lungo termine e prevenire danni ai componenti sensibili.

NOTA!

La pulizia e la disinfezione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, in conformità con la presente documentazione.

Requisiti generali

Per la pulizia, utilizzare esclusivamente **panni morbidi in microfibra**.

Non utilizzare panni abrasivi o ruvidi che potrebbero graffiare o danneggiare la superficie.

Non spruzzare direttamente sul dispositivo prodotti detergenti o disinfettanti.

ATTENZIONE!

Prevenire l'ingresso di liquidi

L'ingresso di liquidi può danneggiare in modo irreversibile i componenti audio.

- Non utilizzare un panno bagnato.
- Utilizzare solo la quantità minima di detergente necessaria per una pulizia adeguata.
- Evitare che i detergenti entrino nelle aperture del microfono e dell'altoparlante.
- Evitare di spruzzare direttamente sul dispositivo.

ATTENZIONE!

Prevenire il malfunzionamento del sensore

I residui possono attirare la polvere e limitare il campo visivo del sensore.

- Evitare che sulla superficie rimangano residui di detergente.
- Evitare che polvere o particelle si accumulino sul copriobiettivo.

Procedura di pulizia

1. Inumidire leggermente un panno morbido in microfibra con un prodotto detergente o disinfettante adatto.
2. Pulire delicatamente tutte le superfici esterne senza esercitare una pressione eccessiva.

3. Assicurarsi che nessun liquido penetri nelle aperture dei dispositivi (microfono, altoparlante).
4. Dopo la pulizia, strofinare accuratamente il dispositivo con un panno in microfibra asciutto per rimuovere ogni residuo.

Requisiti successivi alla pulizia

Un'asciugatura adeguata riduce al minimo lo stress chimico sui componenti audio e previene l'accumulo di polvere che potrebbe compromettere le prestazioni dei sensori (ad esempio, un campo visivo limitato a causa della contaminazione del copriobiettivo).

- Assicurarsi che sulla superficie non rimangano residui visibili.
- Assicurarsi che tutte le superfici siano completamente asciutte.

Detergenti e disinfettanti approvati

Il seguente elenco riporta una serie di prodotti per la pulizia e la disinfezione approvati, adatti a garantire la durata e le prestazioni dei vostri dispositivi.

Questi prodotti sono stati selezionati appositamente per la loro compatibilità con i materiali della superficie del dispositivo e garantiscono un impatto minimo con un tempo di esposizione di almeno 60 ore.

Agente

Isopropanolo (alcol isopropilico; IPA) al 70%
Etanolo (alcol etilico)
Soluzione salina al 10%

Compatibilità

Compatibile a una concentrazione dell'1,0%
Compatibile a una concentrazione dello 0,5%
Compatibile a una concentrazione dell'1,0%

Detergenti incompatibili

Non utilizzare le seguenti sostanze, poiché potrebbero danneggiare le superfici o compromettere l'efficacia della disinfezione:

- Metiletilchetone (MEK)
- Composti organici contenenti idrocarburi lipidici, compresi i derivati degli acidi grassi
- DEHP (ftalato di di(2-etilesile))
- Candeggina (soluzione di ipoclorito di sodio)
- Disinfettante Cidex a base di glutaraldeide
- Disinfettante biologico Virex a base di cloruro di ammonio
- Microbicide Betadine; soluzione di iodopovidone
- Perossido di idrogeno



IT_07/26

MOBOTIX AG - Am Stundenstein 2 - D-67722 Winnweiler - Tel.: +49 6302 9816-103 - sales@mobotix.com - www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni contenute nel presente documento. Tutti i diritti sono riservati. © MOBOTIX AG 2019