



c ONE NurseAssist & c71 NurseAssist Leitfaden für die Reinigung und Desinfektion

Wichtige Informationen und Empfehlungen für die sichere Verwendung von
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Inhalt

Allgemeine Informationen	3
Übersicht der Oberflächenmaterialien.....	3
Allgemeine Reinigungshinweise.....	4
Zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsmittel	4
Nicht zugelassene Reinigungsmittel.....	5
Rechtliche Haftungsausschlüsse	5
Kontaktinformation	6

Allgemeine Informationen

Um eine sichere und wirksame Reinigung und Desinfektion der Smart Sensors *c ONE NurseAssist* und *c71 NurseAssist* im Bereich der Pflege zu gewährleisten, ist es wichtig, sowohl die Unversehrtheit der Geräte als auch die Gesundheit und Sicherheit von Patienten und Personal zu berücksichtigen. Angesichts der Vielfalt der in diesen Geräten verwendeten Materialien und der Notwendigkeit, eine wirksame Desinfektion zu gewährleisten, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern, soll dieses Dokument als Leitfaden für die Auswahl der geeigneten Reinigungsmittel und Verfahren für Ihre *c ONE NurseAssist* und *c71 NurseAssist*-Sensoren dienen, wobei sowohl die Materialkompatibilität als auch die Hygieneanforderungen in der Pflege berücksichtigt werden.

Dieses Dokument enthält eine sorgfältig zusammengestellte Liste von Reinigungsmitteln und Anweisungen, die speziell auf die Bedürfnisse und Sicherheitsanforderungen von *c ONE NurseAssist* und *c71 NurseAssist*-Geräten und ähnlichen MOBOTIX IoT-Kameras zugeschnitten sind. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Kunden über das notwendige Wissen verfügen, um ihre Geräte effektiv zu reinigen und zu desinfizieren, ohne deren Funktionalität oder Lebensdauer zu beeinträchtigen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Empfehlungen um allgemeine Richtlinien handelt. Bei Unsicherheiten ist es immer ratsam, zusätzlich Ihren direkten MOBOTIX-Partner oder Ihren lokalen MOBOTIX-Vertriebskontakt für spezifische Reinigungsempfehlungen zu kontaktieren.

Übersicht der Oberflächenmaterialien

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die für die Oberfläche des Geräts verwendeten Materialien, die für die Wahl der richtigen Reinigungsmethode zur Erhaltung des Zustands und der Funktionalität des Geräts wichtig sind:

Body:

glasfaserverstärktes
Polybutylenterephthalat (PBT)

Objektivabdeckung:

Glas

LED-Abdeckung:

Polycarbonat





Allgemeine Reinigungshinweise

Zum Reinigen und Desinfizieren der Oberflächen der *c ONE / c71 NurseAssist* sollten Sie immer ein weiches Mikrofasertuch verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuertüchern, die die Oberfläche zerkratzen können.

Achten Sie darauf, dass das Tuch nicht nass verwendet wird, sondern nur mit der für eine ordnungsgemäße Reinigung erforderlichen Menge an Mittel. Darüber hinaus darf das Gerät nicht besprüht werden. In beiden Fällen besteht die Gefahr, dass Reinigungsmittel in die Mikrofon- und Lautsprechereinlässe gelangen und diese Bauteile beschädigen.

Es ist auch darauf zu achten, dass das Gerät nach der Reinigung mit einem trockenen Mikrofasertuch abgewischt wird, damit keine Rückstände des Reinigungsmittels auf der Oberfläche verbleiben. Dies minimiert das Risiko, dass die Oberflächen der oben genannten Audiokomponenten ungewollt durch verdunstende Mittel angegriffen werden und verhindert auch, dass sich in den Rückständen Staub oder andere Partikel absetzen und die Funktion des Sensors direkt beeinträchtigen (z.B. eingeschränktes Sichtfeld durch Staub auf der Objektivabdeckung).

Zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsmittel

In der folgenden Liste finden Sie eine Reihe von zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, die sich für den Einsatz eignen, um die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte zu gewährleisten.

Diese Produkte wurden speziell nach ihrer Kompatibilität mit den Oberflächenmaterialien des Geräts ausgewählt und versprechen minimale Auswirkungen bei einer **Expositionsdauer von mindestens 60 Stunden**.

- Isopropanol (Isopropylalkohol; ipa) 70%
- Ethanol (Ethylalkohol)
- Kochsalzlösung 10%

Nicht zugelassene Reinigungsmittel

Die folgenden Reinigungs- und Desinfektionsmittel sollten ausdrücklich nicht verwendet werden, da sie die Oberflächen beschädigen oder die Wirksamkeit der Desinfektion beeinträchtigen können:

- Methylethylketon (MEK)
- Lipidkohlenwasserstoffhaltige organische Verbindungen; Fettsäurederivate
- DEHP Diethylhexylphthalat
- Bleiche Natriumhypochloritlösung
- Cidex Desinfektionsmittel auf Glutaraldehydbasis
- Virex organisches Desinfektionsmittel auf Ammoniumchloridbasis
- Betadine Mikrobizid; Povidon-Iod-Lösung
- Wasserstoffsuperoxyd

Rechtliche Haftungsausschlüsse

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen über zugelassene Reinigungsmittel und entsprechende Reinigungsanweisungen für Überwachungsgeräte im Pflegebereich dienen als allgemeiner Leitfaden und sind nicht als umfassende oder abschließende Beratung gedacht. Obwohl MOBOTIX sich bemüht, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, übernimmt MOBOTIX keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Eignung der Informationen für den Betrieb der Geräte in jeder möglichen Situation und Umgebung. Die Verwendung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte und Verfahren erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers.

Es wird empfohlen, die Reinigungs- und Desinfektionsempfehlungen stets zu beachten und sich bei Unklarheiten direkt an den MOBOTIX-Partner oder den MOBOTIX-Vertrieb zu wenden. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reinigungsmitteln oder -methoden kann zum Erlöschen der Garantie für Ihr Gerät führen und Schäden verursachen, für die MOBOTIX keine Haftung übernimmt.

Darüber hinaus liegt es in der Verantwortung des Benutzers, alle lokalen, regionalen und nationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in Bezug auf die Reinigung und Desinfektion der entsprechenden Überwachungsgeräte einzuhalten. Dieser Haftungsausschluss stellt keine Rechtsberatung dar und wir empfehlen, bei Bedarf professionellen Rechtsrat einzuholen.

MOBOTIX behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers/Endkunden, sich regelmäßig über etwaige Änderungen zu informieren und seine Reinigungspraxis entsprechend anzupassen.

Kontaktinformation

MOBOTIX AG

Am Stundenstein 2

D-67722 Winnweiler

Deutschland

E-Mail: sales@mobotix.com